

ATB™ Medium / ATB S Medium

IVD

Среда ATB / Среда ATB S

Среды для определения чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам на стрипах ATB

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Среды ATB и ATB S предназначены для использования в качестве питательных сред со стрипами ATB, как описано в инструкциях по применению этих стрипов.

СОСТАВ НАБОРА

- 100 ампул среды ATB (Ref. 14 960) или 10 ампул среды ATB S (Ref. 14 931)
- 1 инструкция

СОСТАВ


ATB 7 мл (Ref 14 960)	Основа Мюллер-Хинтон (животного происхождения) 1000 мл Глюкоза 2 г Ca ⁺⁺ до 50 мг Mg ⁺⁺ до 20 мг Агар 1.5 г pH : 7,2 - 7,4
ATB S 7 мл (Ref 14 931)	Триптон (животный) 10 г Гидролизат желатина (животный) 10 г Био-сойза 3 г Дрожжевой экстракт 5 г Глюкоза 1,5 г Натрия хлорид 5 г L-аргинин 1 г Натрия пируват 1 г Менадион 0,5 мг Гемин (животный) 15 мг Агар 1,5 г Деминерализованная вода 1000 мл pH : 7,0 - 7,4

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Для лабораторной диагностики.
- Для профессионального использования.
- Не используйте среды по истечении срока годности.
- Не используйте наборы с видимыми повреждениями (поврежденная упаковка, ампулы, грязь и прочее).
- Среды содержат агар, но предварительного нагревания не требуется. Среды используются как жидкие среды.
- Перед началом работы выдержите среды до достижения комнатной температуры.
- **Не встряхивайте ампулы.**

- Чтобы вскрыть ампулу:

- Поместите ампулу в протектор.
- Возьмите протектор в руку вертикально (белым пластиковым колпачком вверх).
- Надавите на колпачок вниз до упора.
- Поместите большой палец на испещренную поверхность колпачка и надавите таким образом, чтобы сдвинуть колпачок вперед. При этом колпачок вскрывает ампулу.
- Выньте ампулу из протектора и отложите его для дальнейшего использования.
- Осторожно снимите колпачок с ампулы.

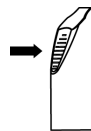

- Все образцы, микробные культуры и загрязненные ими материалы следует считать инфекционными и обращаться с ними соответствующим образом. При работе с культурами микроорганизмов следует соблюдать правила стерильности и общие меры предосторожности. См. документ "CLSI M29-A, *Protection of Laboratory Workers From Occupationally Acquired Infections; Approved Guideline* – действующая версия". За дополнительной информацией о мерах предосторожности обращайтесь к документу "Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories – CDC/NIH – последнее издание", или законодательству Вашей страны.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

- Среды следует хранить при температуре 2-8°C в темноте до истечения срока годности, указанного на этикетке каждой ампулы.
- После вскрытия коробки проверьте, не повреждены ли ампулы. Если в коробке имеются поврежденные ампулы, набор следует сбросить в подходящий контейнер для утилизации.

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Использованные и неиспользованные реактивы, а также контаминированные материалы следует утилизировать в соответствии с правилами утилизации потенциально инфекционных материалов. Сотрудники лаборатории несут ответственность за утилизацию отходов в соответствии с их типом и классом опасности, а также законодательными нормами.

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

в конце данной инструкции

bioMérieux, голубой логотип и ATB являются используемыми, зарегистрированными и/или находящимися в процессе регистрации торговыми марками, принадлежащими компании bioMérieux SA или одной из ее дочерних компаний.

Другие названия и торговые марки являются собственностью их соответствующих владельцев.



bioMérieux SA
au capital de 12 029 370 €
RCS LYON 673 620 399

69280 Marcy-l'Etoile / France
Тел. 33 (0)4 78 87 20 00
Факс 33 (0)4 78 87 20 90
<http://www.biomerieux.com>



ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

Символ	Обозначение
	Номер по каталогу
	Для лабораторной диагностики
	Произведено
	Температурные ограничения
	Беречь от света
	Использовать до
	Номер партии
	Прочтите инструкцию по применению
	Содержимого достаточно для "n" тестов