

# SIEMENS

## Концентрат промывочного раствора CLINITEK Novus (CLINITEK Novus Rinse Additive)

Для использования с автоматическим анализатором мочи CLINITEK Novus

### Краткое описание и разъяснение/Использование по назначению:

Концентрат промывочного раствора CLINITEK Novus (**RINSE ADDITIVE**) разбавляется для использования в качестве промывочного раствора в автоматическом анализаторе мочи CLINITEK Novus. Этот продукт предназначен для профессионального использования в *in vitro* диагностике (**IVD**). Прочтите данную инструкцию-вкладыш (**IVD**) перед подготовкой раствора.

### Инструкция по использованию:

Наполните емкость для промывки, поставляемую с анализатором, 1000 мл дистиллированной или деионизованной воды. Добавьте 2 мл Концентрата промывочного раствора и плотно закрутите крышку. Мягко покачивайте емкость круговыми движениями, чтобы жидкости хорошо смешались. Готовьте свежий раствор, как минимум, каждые 2 недели.

Хранение и подготовка	Ингредиенты	Поставка
Хранить в диапазоне температур 15-30°C (15°C - 30°C) (59-86°F). Концентрат промывочного раствора стабилен до окончания срока годности (☞), указанного на этикетке бутылки. Утилизируйте Концентрат промывочного раствора и промывочный раствор в соответствии со стандартными процедурами Вашей лаборатории.	3.5% мас. / Об. Гидросульфат гексадецилтриметиламмония;  3.5% мас. / Об. Гексагидрат хлорида магния; поверхностно-активное вещество.	Концентрат промывочного раствора CLINITEK Novus (CLINITEK Novus Rinse Additive), SMN 10697754 поставляется в коробке с 4 бутылками по 26 мл в каждой.



### Внимание!

H290 – Может вызвать коррозию металлов  
P390 – Ликвидируйте утечку во избежание повреждения материалов  
Паспорта безопасности (MSDS / SDS), доступны на сайте [www.siemens.com/poc](http://www.siemens.com/poc)



Сделано в США



Siemens Healthcare Diagnostics Inc.  
511 Benedict Avenue  
Tarrytown, NY 10591-5097 USA



Siemens Healthcare Diagnostics Ltd.  
Sir William Siemens Sq.  
Frimley, Camberley, UK GU16 8QD

[www.siemens.com/poc](http://www.siemens.com/poc)

**Global Siemens  
Headquarters**  
Siemens AG  
Wittelsbacherplatz 2  
80333 Muenchen  
Germany

**Global Siemens  
Healthcare Headquarters**  
Siemens AG  
Healthcare  
Henkestrasse 127  
91052 Erlangen  
Germany  
Phone: +49 9131 84-0  
[www.siemens.com/healthcare](http://www.siemens.com/healthcare)

**Global Division**  
Siemens Healthcare  
Diagnostics Inc.  
511 Benedict Avenue  
Tarrytown, NY 10591-5097  
USA  
[www.siemens.com/diagnostics](http://www.siemens.com/diagnostics)